

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

単回使用一般静脈用翼付針 「ニプロ PSV セット」に関する使用上の注意のお願い

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております単回使用一般静脈用翼付針「ニプロ PSV セット」(以下「本製品」といいます。)におきまして、個包装開封の際、個包装紙が剥がれにくく、製品を取り出しにくい事例のご報告を受領いたしました。

現在、包装紙がスムーズに剥がれ開封できる改良品を生産し、順次出荷しておりますが、本事象につきまして情報提供させて頂くとともに、大変お手数ではございますが、下記の重要な事項を必ずご確認いただきからご使用くださいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

◆ 重要な事項

- ・個包装を開封する際には、フィルムと個包装紙をしっかり持ってゆっくり開封してください。
- ・個包装が開封できなかった際には、無理な製品の取り出しを止め、弊社までご連絡ください。



個包装紙が剥がれにくい製品



フィルムと個包装紙を
しっかり持ってください。



ゆっくり開封してください。

製造販売：ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

お問い合わせ先：ホスピタルケア商品開発営業部

電話 06-6373-0563 FAX 06-6373-0564